

Kurzanleitung für den Upload von Untersuchungsdaten:

1. Folgen Sie dem Uploadlink „Bildversand an die Fachabteilung XYZ“, Sie werden auf die Seite unseres Partners NEXUS / CHILI GmbH weitergeleitet
2. Füllen Sie die Pflichtfelder aus, Sie erhalten dann eine Mail mit dem eigentlichen Versandlink
3. Bei der ersten Nutzung müssen Sie das Uploadprogramm der NEXUS / CHILI GmbH herunterladen und installieren, folgen Sie dazu der Anleitung der NEXUS / CHILI GmbH
4. Legen Sie die CD/DVD/Datenträger mit den DICOM Daten in Ihren Computer ein
5. Wählen Sie die gewünschten Daten aus. Sie können optional noch eine Mitteilung hinzufügen
6. Nach der Zustimmung der Datenschutzerklärung können Sie die Bilder / Untersuchungen mit Klick auf „Jetzt senden“ an die gewünschte Fachabteilung übertragen
8. Bitte kontaktieren Sie die Fachabteilung (siehe Kontakt)

Bebilderte Anleitung:

1. Folgen Sie dem Link zur Anforderung eines Versandlinks, Sie werden dadurch auf die Seite der NEXUS / CHILI GmbH weitergeleitet. Füllen Sie Felder aus und markieren Sie unter „Empfänger“ die Abteilung. Eine kurze Anleitung auf der Seite hilft Ihnen durch den Vorgang.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://viewer.telekooperation-tnw.de>. The page title is "Bildversand an TKmed®-Teilnehmer". Below the title, there is a section "So geht's:" with instructions. The main form contains the following fields:

- Anrede:** A dropdown menu with "Herr" selected.
- Ihr Name *:** A text input field with a red arrow pointing to it.
- Ihre Institution:** A text input field.
- Ihre E-Mail *:** A text input field with a red arrow pointing to it.
- Empfänger *:** A dropdown menu with a tree structure. The selected path is "Dortmund" > "Klinikum Dortmund gGmbH" > "Klinik" > "Abteilung". The "Abteilung" field is highlighted with a green box and a red arrow.

At the bottom of the form, there are two checkboxes:

- Ich bin kein Roboter. (reCAPTCHA)
- Ich habe die Hinweise zum Datenschutz gelesen und erkläre mich damit einverstanden. *

Below the second checkbox, there is a link: "Eingegebene Daten speichern".

2. Nach der Anforderung des Versandlinks sehen Sie ein Bestätigungsfenster mit Ihrem Token




3. Bitte überprüfen Sie nun Ihren Maileingang, Sie erhalten eine Mail mit dem eigentlichen Versandlink



4. Folgen Sie dem Link aus der oben genannten Mail. Wenn Sie das Angebot des Bilderuploads das erste Mal nutzen, werden Sie aufgefordert, das Uploadprogramm der NEXUS / CHILI GmbH zu installieren. Die Anleitung der NEXUS / CHILI GmbH leitet Sie durch diesen Vorgang. Die Installation ist nur einmalig notwendig.

5. Nach erfolgter Installation des Uploadprogramms wird über den Versandlink aus der Mail folgendes Fenster geöffnet:

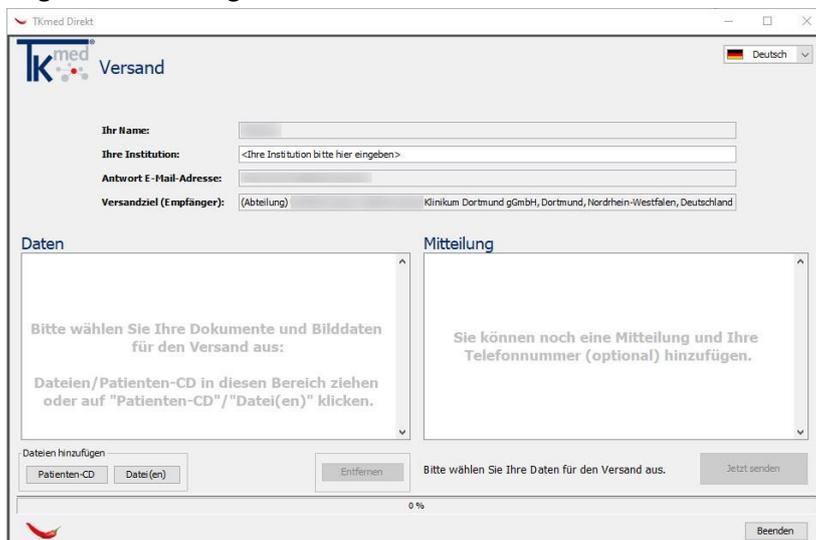

6. Per Drag&Drop aus dem Dateixplorer oder per Navigation über „Dateien hinzufügen“ können Sie die Bilder / Untersuchungen, die Sie einspielen möchten, auswählen. Sie können auch eine Mitteilung hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass diese Mitteilung nicht die erforderliche Kontaktaufnahme (siehe Punkt 9) ersetzt, sondern nur ergänzt.
7. Nach der Auswahl der Bilder / Untersuchungen bitte noch der Datenschutzerklärung zustimmen, danach können Sie die Daten mit „Jetzt senden“ in unser PACS übertragen

8. Nach der Übertragung können Sie das Fenster mit „Beenden“ schließen. Bitte beachten Sie, dass der Versandlink nur für die einmalige Nutzung geeignet ist. Für eine weitere Übertragung fordern Sie bitte einen weiteren Versandlink an
9. Bitte treten Sie nun mit der Fachabteilung, zu der Sie die Daten übertragen haben, in Kontakt. Die Kontaktdaten finden Sie unter „Abteilungslink“ -> Kontakt